



## 乾電池の入れ方

- ① 電池カバーのフックを下に押し下げて電池カバーを外してください。
- ② 単4形アルカリ乾電池2個を本体内側の電池マークの向きに従って挿入してください。
- ③ 電池カバーの下側をボディに差込んでから上側を押込んでください。

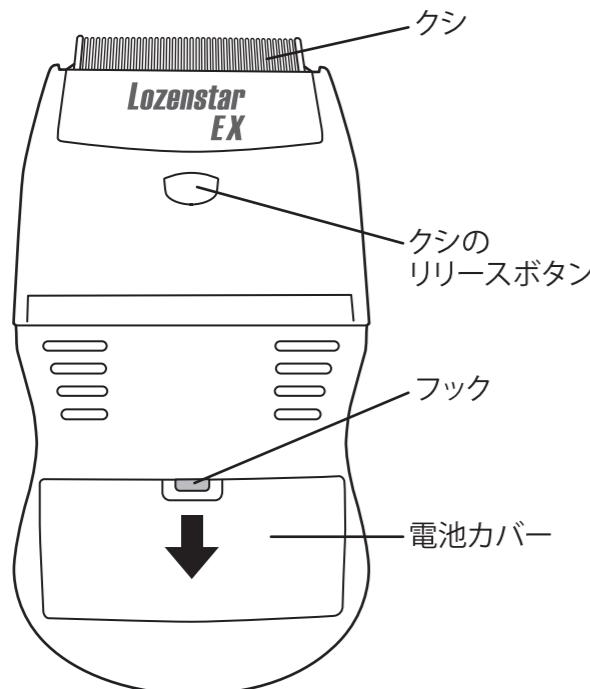

## 使い方

- ① スイッチをONになると、ライトが点灯し、ファンが作動します。
- ② 図のように持ち、被毛をすいてノミをすくい取ります。使用前にブラシやクシでクシ通りをよくしてください。
- ③ すくい取ったノミが透明ケースに入らないときは、クシを上に向けて透明ケースに落し入れてください。
- ④ クシの間に抜け毛やゴミがたまつたら一旦スイッチをOFFにしてクシを外して、抜け毛やゴミを取除いてください。
- ⑤ ノミ取りが終ったらスイッチをOFFにします。ライトが消え、ファンが停止します。
- ⑥ クシのリリースボタンを押して、クシを前方にスライドさせ引抜くようにして、クシを外し抜け毛やゴミを取除きます。
- ⑦ 透明ケースのリリースボタンを押して折り曲げるようにして本体から透明ケースを外し、石けん水を入れたバケツ等の中に浸し、ケース内に石けん水が満杯になったら、そのまま2~3分放置します。
- ⑧ ノミが窒息死したのを確認してから、透明ケースのフタ(空気吸込口付)を開けてノミを処分します。ノミは卵が散りますので、つぶさないでください。

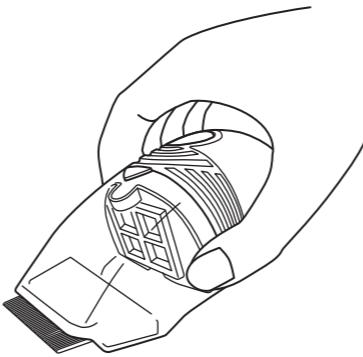

## Lozenstar EX

PEY-600 PE-600EX PE-600

# 犬猫用ノミ取り器

電動吸引式 (単4形アルカリ乾電池X2個使用)

保証書付

## 取扱説明書

ご使用前に、必ず  
この取扱説明書を  
お読み下さい。

このたびは、弊社製品「犬猫用ノミ取り器」をお買い上げいただき、ありがとうございました。この商品を正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。この説明書は保証書を兼ねておりますので、大切に保管してください。



## 安全上のご注意

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。

### 表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を表示しています。その表示と意味は次のようになっています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、損害を負うり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。




- 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
- 本体を水の中に沈めたり、水流を当てたりしないでください。
- 本体は必ずお子様の手の届かない所に保管してください。  
お子様には使用させないでください。



- 本体に落下などの強い衝撃を与えないでください。
- 直射日光・高温多湿の場所や熱機器の近くなどには放置しないでください。
- 犬猫のノミ取り以外の用途に使わないでください。
- 皮フに強く押しつけたり、こすりつけたりしないでください。  
炎症を起こすことがあります。
- 本体の汚れは、ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないで、乾いた布でふき取るか、石けん液を少しふくませた布をご使用ください。



## 各部の名称

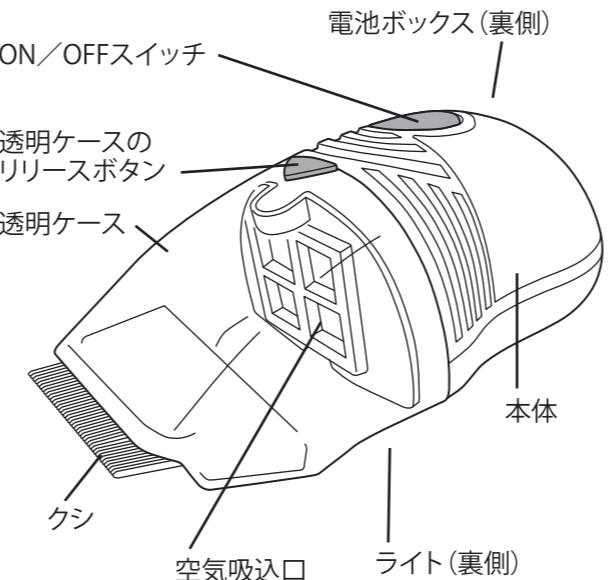

## 仕様

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 定格時間  | 単4形アルカリ乾電池2個使用で約連続60分      |
| 材質    | 本体、透明ケース：ABS樹脂<br>クシ：ステンレス |
| 本体サイズ | 125X63X51 mm               |

\*製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

## 無料修理規定 (日本国内においてのみ有効です)

- ご使用説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答等で、本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、ロゼンスター・エムエフアール株式会社へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

\*保証書は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店又はロゼンスター・エムエフアール株式会社にお問い合わせください。

## 保証書

| 犬猫用ノミ取り器     |     | 持込                        |
|--------------|-----|---------------------------|
| お名前          | 年月日 | 保証期間<br>本体お買い上げ日より<br>1年間 |
| お客様<br>お名前   |     | お電話                       |
| ご住所 (〒)      | 見本  |                           |
| 販売店<br>住所・店名 |     |                           |

本書は本書記載の規定に従って無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

発売元:ロゼンスター株式会社  
輸入元:ロゼンスター・エムエフアール株式会社  
〒210-0012 川崎市川崎区宮前町11-4  
TEL 044-245-9121  
HPアドレス <http://www.lozenstar.co.jp/>

\*ご使用方法の誤りによる故障の場合は、保証期間内でも有償となります。  
※修理依頼の時は、必ず保証書に必要事項をご記入の上、ご提示ください。